


T Thinking

DOMINO
inserto[®]
SEAT


SEAT

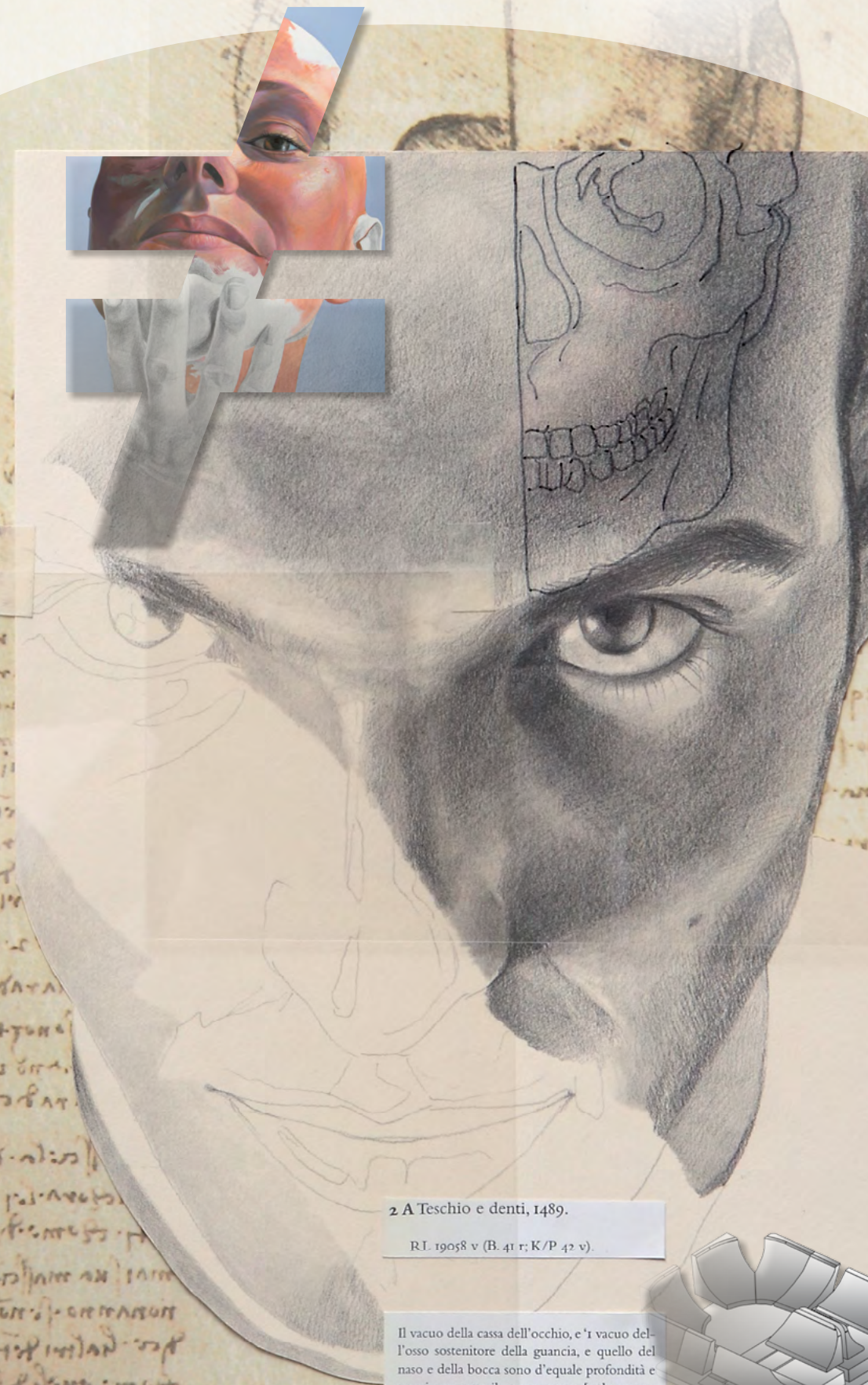

2 A Teschio e denti, 1489.

R.I. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

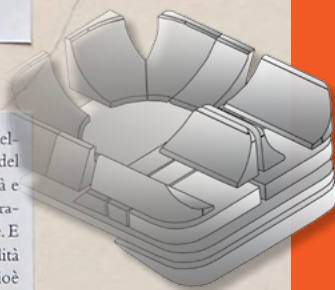

UNA NUOVA SOLUZIONE
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche




Perchè Domino ?

- PERFETTA ADERENZA
- CONFORMAZIONE ANATOMICA
- SOSPENSIONE E SCARICO ISCHIO TROCANTERICO - COCCIGEO - SACRALE



KIT STRUTTURALE
MODULARE E MODIFICABILE

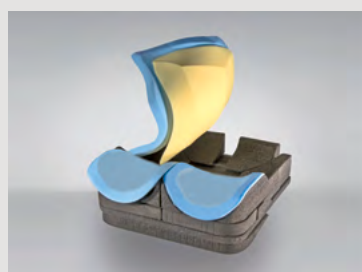

KIT DI IMBOTTITURA
Forme Libere



PROFONDA
IMMERSIONE

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'unità posturale bacino Inserto Seat Domino è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti non deambulanti, con importanti deformità e con una elevata necessità di contenimento posturale, in particolare:

PTS Pelvic Total Support

- Che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità e rotazioni pelviche, anteroversioni e retroversioni pelviche, adduzioni ed abduzioni delle gambe, di entità grave e gravissima;
- Che necessitano di un intervento di stabilizzazione degli ischi;
- Che necessitano di sospensione ischiatica, trocanterica, cocchigea e sacrale;
- Che sono soggetti ad un medio/alto rischio di sviluppare piaghe da decubito;
- Che necessitano di livellamento e contenimento del sistema di relazione gambe, bacino, rachide;

L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggiranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni unità posturale Inserto Domino include:

- Kit strutturale composto da una base piatta di costruzione e 17 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente;
- kit di imbottitura *Forme Libere*, lavabile con detergente neutro, composto:
 - nella zona posteriore da 2 pad sovrapposte, una superiore in foam viscoelastico a ritorno lento di memoria per favorire il massimo comfort ed adattamento alle sagomature del corpo e dell'unità posturale ed una inferiore in memory foam per la più elevata protezione al rischio di piaghe da decubito;
 - nella zona anteriore da 2 pad (lato destro e lato sinistro) in foam viscoelastico a ritorno lento di memoria per favorire un naturale alloggiamento delle gambe.
- Fodera di rivestimento New 3D areata, incontinente, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Fodera di rivestimento
- Kit di imbottitura

AVVERTENZE

L'Unità posturale Inserto Seat Domino, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio della Unità Posturale Inserto Seat Domino, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione, approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com





Inserto Domino

17 INSERTI MODULARI MODIFICABILI


FODERA "NEW 3D" ELASTICA, INCONTINENTE, AREATA.

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO DOMINO	PEDIATRICO						ADULTO					MISURE (cm.)	
	UUS	USS	US	XXS	XS	XS1S	XS1	S	M	M1S	M1	L	XL
MODELLO													
Larghezza Effettiva (cm)	25	30	30	36	36	40	40	42	42	45	45	48	48
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	27	32	32	38	38	42	42	44	44	47	47	50	50
Largh. Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	23	28	28	34	34	38	38	40	40	43	43	46	46
Lunghezza Effettiva (cm)	30	30	38	38	42	40	45	45	50	45	50	45	50
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	32,5	32,5	40,5	40,5	44,5	42,5	47,5	47,5	52,5	47,5	52,5	47,5	52,5
Lunghezza Min ottenibile con regolaz. tagli posteriori e rimozione inserti (cm)*	24	24	32	32	36	34	39	39	44	39	44	39	44
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz.+inserti allogg gambe 1/2/3 (cm)**	4 / 5,5		** altezze riferite ai modelli UUS e XL										
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz.+inserti contenit bacino 7 (cm)**	8,5 / 11,5		** altezze riferite ai modelli UUS e XL										
Peso unità posturale min/max: 0,7 kg/2,8 kg													

* possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale

° Portata Max. riferita al modello XL (48cmx50cm) : 135 kg

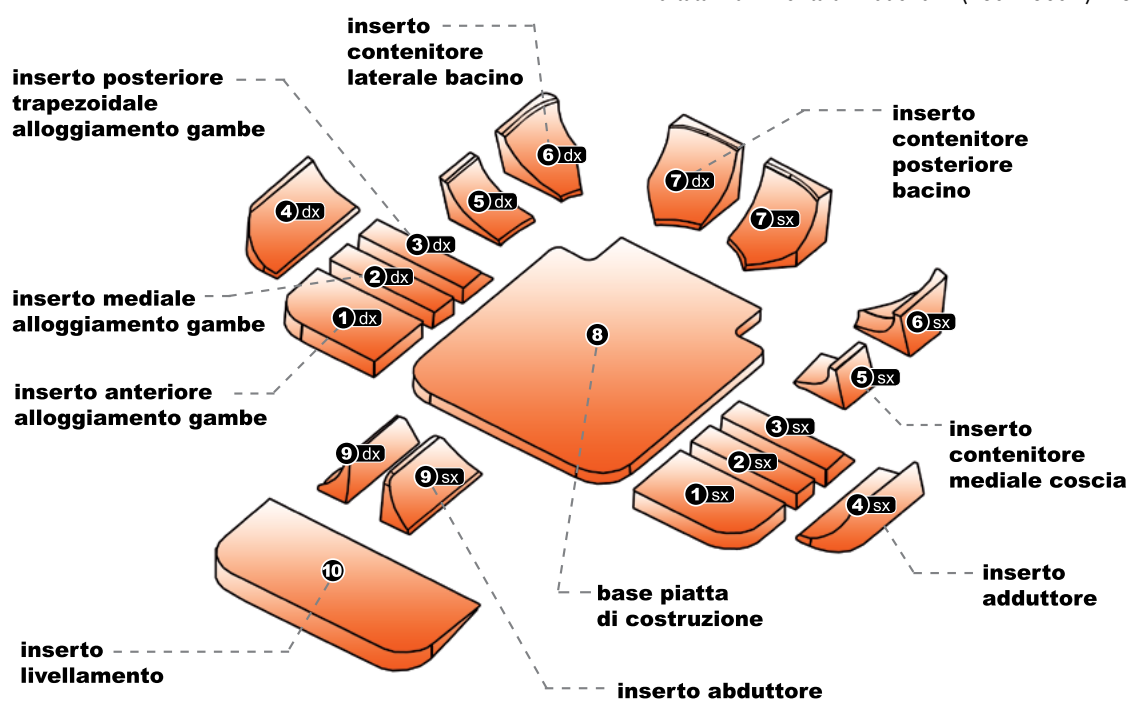




Personalizzazioni Domino



REGOLAZIONE APOGGI
TROCANTERICI PER IPERCARICO ISCHII

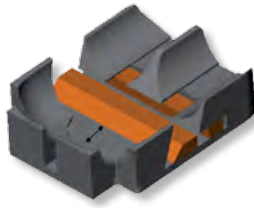

GESTIONE
ANTISCIVOLAMENTO BACINO




GESTIONE ADDUZIONE
FISSA



GESTIONE ABDUZIONE
FISSA



GESTIONE COLPO
DI VENTO

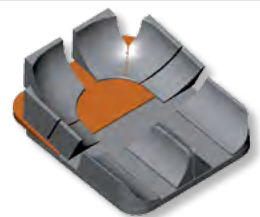


GESTIONE RIGIDITÀ
D'ANCA




GESTIONE OBLIQUITÀ
PELVICA




GESTIONE ROTAZIONE
BACINO

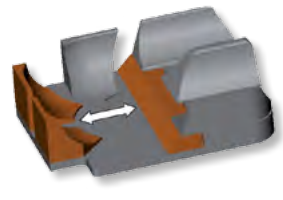


GESTIONE RETROVERSIONE
BACINO E ANTEVERSIONE

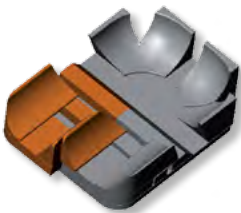

GESTIONE ASIMMETRIA DOVUTA
A LUSSAZIONE (spostando inserti
anteriormente)

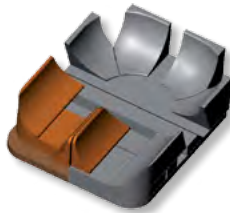

GESTIONE ASIMMETRIA (spostando
posteriormente inserto anteriore)

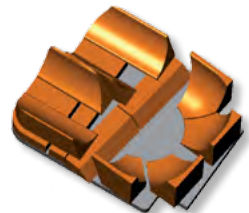

GESTIONE ASIMMETRIA DOVUTA A
ROTAZIONE BACINO

PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale

LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti. L'unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facilmente trasportabile.

1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE


Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.

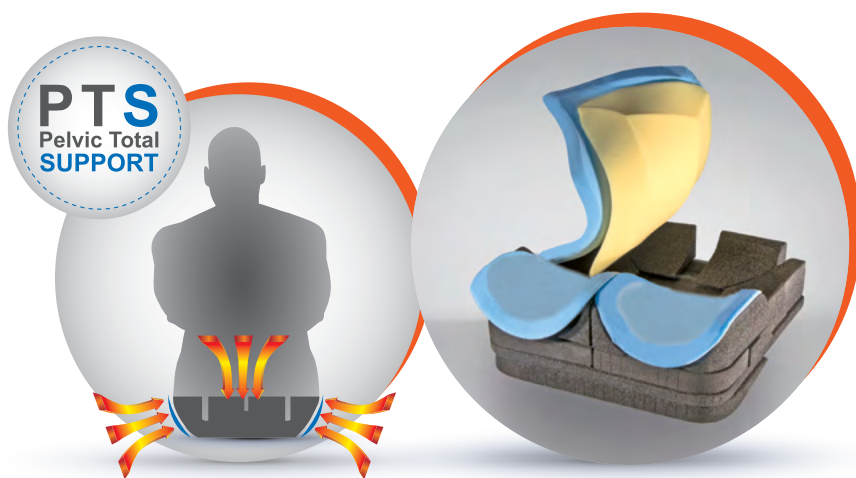





PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411

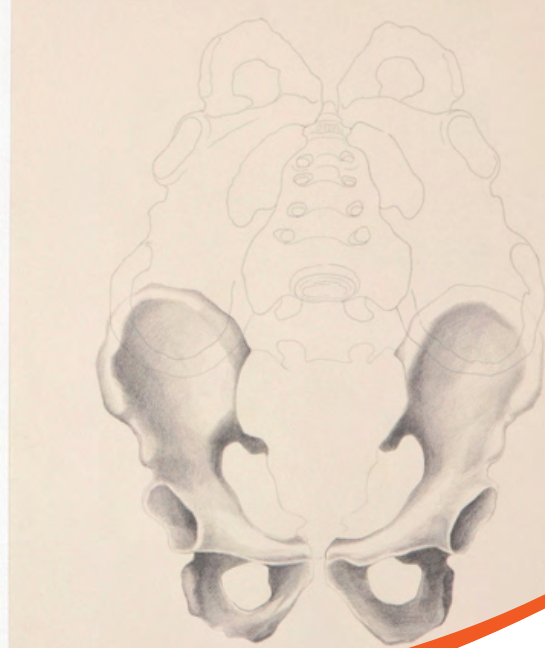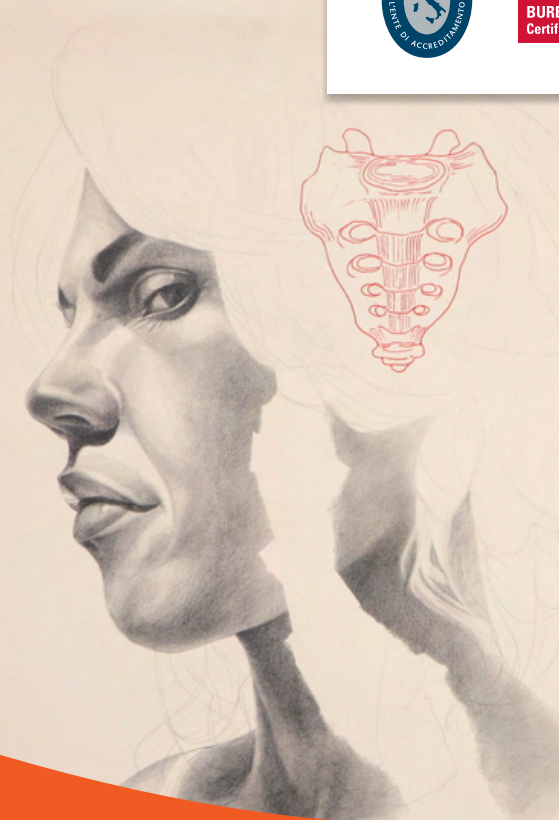

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com